



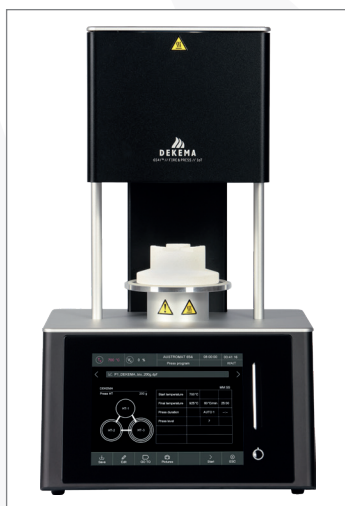

DEKEMA

Pagina 1/4

DOCUMENTO REQUISITI PER INSTALLAZIONE DEKEMA AUSTROMAT™ 654 & 654i™

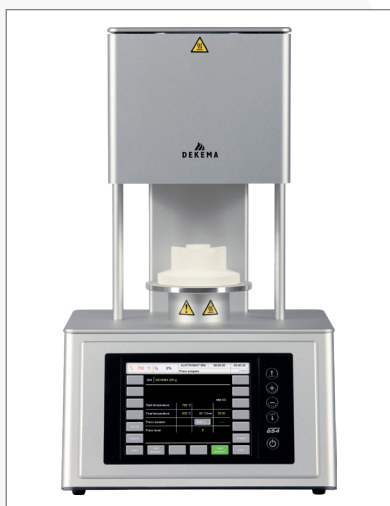

AUSTROMAT™ 654 & 654i™

DIMENSIONI

- » 383 x 343 x 653 mm (W x D x H)
- » Spazio libero richiesto di 20 cm intorno a tutti i lati del dispositivo
- » Peso 22 kg / 24 kg

REQUISITI ELETTRICI

- » 100 V, 16 A, 1450 W
- » 120 V, 16 A, 1400 W
- » 230 V, 6.3 A, 1500 W

DOTAZIONE DI FORNITURA

- » Forno combinato AUSTROMAT™ 654/654i™ per cottura e pressatura con cavo di alimentazione specifico del paese per il collegamento alle prese
- » Pompa per vuoto con tubo per vuoto e cavo di collegamento, tavola di isolamento, pinzette per forni
- » Istruzioni per l'uso
- » Materiale di imballaggio (scatole di cartone, materiale espanso per la protezione dagli urti)
- » Set di calibrazione per la calibrazione della temperatura
- » Accesso e controllo remoto tramite dispositivo mobile o PC, accesso al database DEKEMA e aggiornamenti online sono inclusi nella fornitura per AUSTROMAT™ 654i™, opzionale per AUSTROMAT™ 654

NORME GENERALI DI SICUREZZA

- » Seguire il protocollo di briefing del dispositivo DEKEMA (pagina successiva)
- » Leggere e apprendere le istruzioni per l'uso

I clienti saranno responsabili dello spostamento dell'attrezzatura alla destinazione finale dal momento della consegna dell'attrezzatura.

Ho esaminato i requisiti di cui sopra e certifico che la mia struttura soddisfa o supera i requisiti di cui sopra.

Firma: _____

Data: _____

Si prega di restituire una copia firmata al vostro rappresentante ufficiale DEKEMA.

Una volta ricevuto il documento firmato, sarà possibile programmare l'installazione e la formazione.



DEKEMA

Data _____
 Nome del cliente _____
 Strada _____
 Codice postale, città _____

Tipo di forno _____
 N° di serie _____

PROTOCOLLO DI BRIEFING DEL DISPOSITIVO

OPZIONI INTERNET	220	624 / i	644	654 / i	664 / i	674 / i	µSiC
<input type="checkbox"/> Registrarsi nel browser	x	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Attivare le opzioni	-	x/√	x	x/√	x/√	x/√	√
IL FORNO							
<input type="checkbox"/> Montare la resistenza elettrica	-	-	-	-	x	x	-
<input type="checkbox"/> Installare e accendere il forno	x	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Installare la pompa del vuoto	x	x	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Installare l'unità di ventilazione	x	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Indicare l'attacco USB e le prese	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Integrare i forni attivati nella rete	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Attivare Circle	-	-/x	-	-/x	-/x	-/x	-
<input type="checkbox"/> Spiegazioni sul maneggiamento del piano di cottura	x	x	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Spiegazioni sul maneggiamento del piano di pressatura	-	-	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Spiegazioni sul maneggiamento dei piatti e anelli di sinterizzazione	-	-	-	-	x	x	x
<input type="checkbox"/> Mai utilizzare il forno senza aver collocato sul piattello il piano di cottura/pressatura o il piattello per sinterizzare	x	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Dopo aver spiegato tutte le parti si passa all'accensione del forno	-	x	x	x	x	x	x
DISPLAY PER COMANDI							
<input type="checkbox"/> Spiegazioni della guida grafica per l'utilizzatore e del terminale USB	x	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Funzionamento via Internet, se abilitato	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Presentare i programmi specifici del cliente	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Preriscaldare dopo l'accensione del forno o l'utilizzo del forno	x	x	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Scegliere i programmi	x	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Cambiare i parametri, anche mentre il forno svolge un programma	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Scrivere un nuovo programma	x	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Salvare e caricare singole configurazioni	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Trasferimento di ulteriori settaggi e programmi dalla banca dati utilizzo chiavetta USB	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Trasferimento di ulteriori settaggi e programmi dalla banca dati utilizzo Internet	-	x	x	x	x	x	x
SETUP MENU							
<input type="checkbox"/> Impostazioni lingua, data, orario	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Spiegazione programma di controllo (Sequenza: programma di essiccazione, programma di controllo)	-	x	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Spiegazione della calibrazione della temperatura con i fili d'argento (Sequenza: cottura di purificazione e prova con filo d'argento)	x	x	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Spiegazione della calibrazione con l'anello PTC	-	-	-	-	x	x	x
<input type="checkbox"/> Codice generale: bloccare e fissare i programmi	-	x	x	x	x	x	-
<input type="checkbox"/> Attivare la disponibilità a lungo termine (tasto „Sleep“ da scegliere nel programma)	-	x	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Spiegazione e attivazione del blocco di sicurezza dell'ascensore, nel forno da pressare	-	-	x	x	-	-	-
<input type="checkbox"/> Eseguire la calibrazione dello schermo	x	x	x	x	x	x	-
<input type="checkbox"/> Effettuare un backup del forno e caricare l'Update	-	x	x	x	x	x	x

Tutti i punti sopra menzionati sono stati spiegati. Le istruzioni d'uso sono state passate all'utilizzatore.

Istruttore:

Cliente:

Nome e firma _____

Nome e firma _____



DEKEMA

Pagina 3/4

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO CONSIGLIATI PER AUSTROMAT™ 654 / 654i™



Pacchetto software per
AUSTROMAT™ 654
Art. # 101933

Opzionale per AUSTROMAT™ 654



Sistema di muffole trixpress™,
set Art. # 101807-01



trixpress™ muffle former,
segmenti da 380 g
Art. # 101808



Pistone della pressa trixpress™,
Ø 13 mm (50 pezzi)
Art. # 105891



Segnaposto (50 pezzi blu),
Ø 13 mm
Art. # 101915



Set di campioni in argento,
Sistema di pressatura a
timbri multipli
Art. # 101818



Pinzette, logo DEKEMA
Art. # 105236



DEKEMA

Pagina 4/4

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO CONSIGLIATI PER AUSTROMAT™ 654 / 654i™



Supporto in ceramica (6 pezzi)
Art. # 105488



Tavolo della stampa,
Sistema di stampa a
timbri multipli
Art. # 101726



Tavolo di cottura,
Forno a timbri multipli
Art. # 101734



Vassoio di cottura, set
Art. # 106490